

Nyt myös mintunmakuisena!

Nupro® White Varnish

Kostealle hampaan
pinnalle levitettävä
läpinäkyvä
fluorilakka




Nupro® White Varnish 5 % Natriumfluoridi


- Voidaan levittää märälle hampaan pinnalle
- Nopeasti värittömäksi kovettuva lakka on mukava potilaalle
- Vain kahden tunnin suoja-aika lakan levittämisen jälkeen
- Helposti levitettävä, ei valu eikä paakkuunnu
- Annospakattu hygienian varmistamiseksi

Ainutlaatuinen koostumus takaa fluorin nopean vapautumisen ja parhaan mahdollisen imeytymisen¹

Nupro® White Varnish
Keskimääräinen fluorin vapautuminen

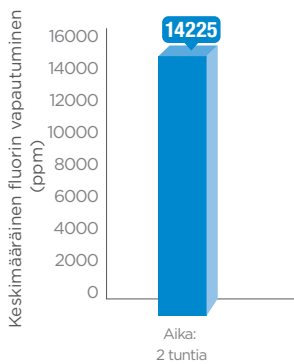


Nupro® White Varnish
Fluorin imeytyminen

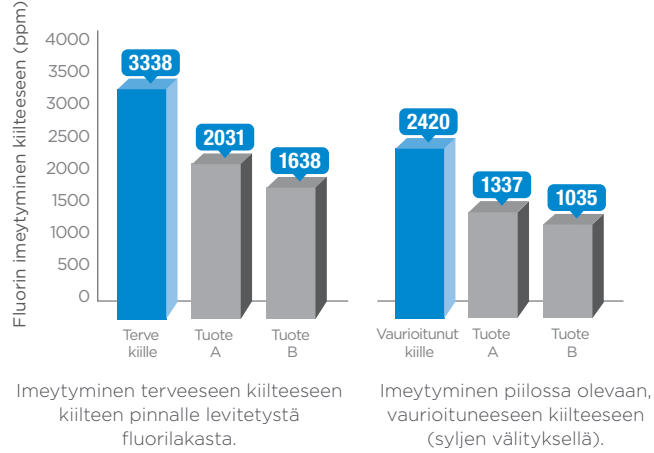


Vähentää välittömästi hampaiden arkuutta

In vitro- tutkimuksissa on havaittu Nupro® White Varnishin sulkevan dentiinitubulukset lähes täydellisesti. Käyttäjätutkimuksien mukaan hampaiden arkuuden aiheuttamat ongelmat helpottivat välittömästi Nupro® White Varnishin levittämisen jälkeen ja vaikutus kesti jopa kahdeksan viikkoa².

Ennen hoitoa

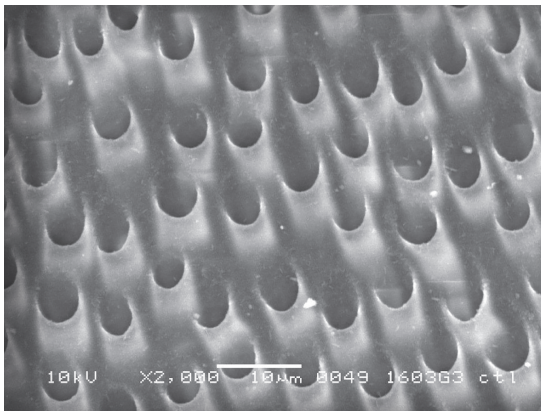

Hoidon jälkeen

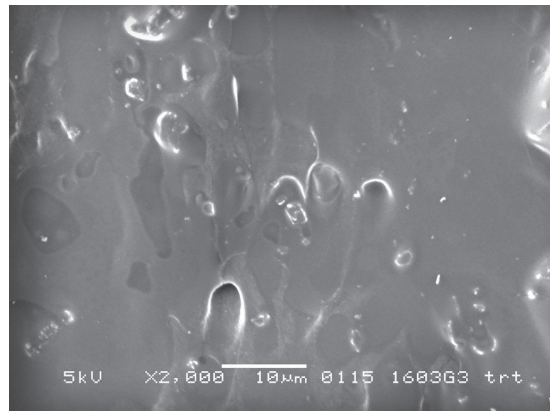

2000-kertainen suurennos.

Tuotenumero	Tuotekuvaus	Pakkauskoko
130210EU	Viinirypäle 0,4 g	50 kpl
130213EU	Vadelma 0,4 g	50 kpl
130222EU	Minttu 0,4 g	50 kpl

* Pakkauksessa tulee myös 50 lakanlevitysharjaa ja pidike.

Ota yhteyttä Dentsply Sironan edustajaan Suomessa: www.dentsplysirona.com.

¹ Fluorin imeytymistä kiilteeseen selvittäneessä tutkimuksessa lakkaa levitettiin ehjille, kiillotetuille kiillennäytteille. Kunkin näytteen parina oli näyte, jossa oli keinotekoisesti luotu kiillevaurio. Vaurioituneeseen näytepalaan ei levitetty lakkaa. Näyteparit upotettiin keinotekoiseen sylkeen 5 minuutiksi ja siirrettiin sitten puhtaaseen keinotekoiseen sylkeen. Prosessi toistettiin 15 minuutin, 30 minuutin, 1 tunnin ja 4 tunnin kohdalla, ja kaikkiaan kiillennäytteet olivat upotettuna keinotekoiseen sylkeen 24 tuntia. Jäljelle jäänyt fluorilakka poistettiin 24 tunnin jälkeen. Kustakin kiillennäytteestä poistettiin yksi kiillekerros ja sen fluoripitoisuus analysoitiin. Nupro® White Varnishista imeytyi niin ehjään kuin vaurioituneeseenkin kiilteeseen merkittävästi enemmän fluoria kuin VOCO Profluorid® tai Colgate® Duraphat -lakoista.

² Tutkimusdata Dentsply Sironan tutkimuksesta.