

Tuotetiedot

FD 366 sensitive top wipes

Herkkien pintojen desinfiointi



FD 366 sensitive top wipes yhdellä silmäyksellä

- Kätevät desinfointipyyhkeet invasiivisten ja ei-invasiivisten lääkinnällisten laitteiden herkkien pintojen pikadesinfointiin vastaanotoilla, laboratorioissa ja sairaaloissa.
- Erinomainen yhteensopivuus materiaalien kanssa. Sopii erityisesti hoitolaitteiden herkille akryyli-, muovi- ja tekonahkapinnoille.
- Vaikutusaika VAH:n mukaan vain 1 minuutti.
- Laaja vaikutusspektri: bakterisidinen, tuberkulosidinen, hiivasieniä tuhoava, rajoitetusti virusidinen (vaipalliset virukset ml. HBV, HCV ja HIV sekä vaipattomat norovirukset).
- FD 366 sensitive top wipes -pyyhkeiden vaikuttavan aineen liuos FD 366 sensitive on testattu ajankohtaisten VAH-menettelmien ja eurooppalaisten standardien mukaan.
- Testattu 4-kenttätestissä VAH:n ja EN 16615:n mukaan.
- FD 366 sensitive top wipes -pyyhkeet ovat VAH-sertifioituja. FD 366 sensitive on VAH-listassa.
- Pyyhkeiden koko: 175 x 250 mm.

Ominaisuudet

Dürr System-Hygiene -tuotesarjan FD 366 sensitive top wipes -pyyhkeet ovat käyttövalmiita desinfointipyyhkeitä. Ne soveltuvat erityisesti invasiivisten ja ei-invasiivisten lääkinnällisten laitteiden kuten esim. hoitolaitteiden muoviosien ja tekonahkapäällisten, akryylilasin, laitesuojusten ja letkutelineiden nopeaan desinfointiin. Lisäksi FD 366 sensitive top wipes -pyyhkeet ovat yhteensopivia myös hoitolaitteiden näppäimien tai XR-röntgenfilmin kehityslaitteiden kanssa. FD 366 sensitive top wipes -pyyhkeillä desinfioidut pinnat kuivuvat nopeasti.

Koostumus

FD 366 sensitive top wipes -pyyhkeet sisältävät FD 366 sensitive -ainetta, joka on alkoholien ja kvaternääristen ammoniumyhdisteiden sekä apuaineiden nopeavaikutteinen yhdistelmä. 100 g vaikuttavan aineen liuosta sisältää 17 g 1-propanolia, 0,125 g alkyylibentsyyli-dimetyyli-ammoniumkloridia, apuaineita ja vettä.

Mikrobiologinen teho

FD 366 sensitive top wipes vaikuttaa bakterisidisesti¹⁾, tuberkulosidisesti¹⁾, hiivasieniä tuhoavasti¹⁾, rajoitetusti virusidisesti (vaipalliset virukset ml. HBV, HCV ja HIV^{2), 3)} sekä vaipattomat norovirukset⁴⁾).

FD 366 sensitive top wipes -pyyhkeet ovat VAH-sertifioituja. FD 366 sensitive on VAH-listassa. Testattu EN 13727, EN 13624, EN 14348, EN 14476, EN 16615 mukaan.

Käyttö

Ota FD 366 sensitive top wipes -desinfointipyyhkeet yksitellen säiliöstä. Pyyhi desinfioitavat pinnat ja esineet ja anna valmisteeseen vaikuttaa. Vaikutusaika VAH:n mukaisesti 1 minuutti. Sulje Flowpack välittömästi sen jälkeen, kun sieltä on otettu pyyhke.

Ympäristövaikutukset

Vaikuttavan aineen liuos FD 366 sensitive on OECD-kriteerien 301 D mukaan biologisesti helposti hajoava. Pakkauksen materiaalin voi lämpökierrättää. Hävitä käytetyt pyyhkeet talousjätteen seassa. Älä heitä WC:hen.

Tuotetiedot

FD 366 sensitive top wipes

Herkkien pintojen desinfiointi

Fysikaaliset ominaisuudet

Vaikuttavan aineen liuos:

Ulkonäkö: kirkas, väritön liuos

Tiheys: $D = 0,97 \pm 0,02 \text{ g/cm}^3$ (20 °C)

Leimahduspiste: 33 °C (DIN 51755)

Säilyvyys

3 vuotta

Avattu pakkaus 1 kuukausi.

Pakkauskoost

Flowpack, sis. 50 pyyhettä

4 x 50 pyyhettä pakkauksessa

Säilytys

Säilytä valmistetta vähintään 5 °C:n ja enintään huoneen lämpötilassa.

Yleisiä ohjeita

Lääkinnällisten laitteiden kuten polymerointilamppujen, turbiinien sekä käsi- ja kulmakappaleiden ulkopinnat on desinfioitava valmistajan antamien määräysten mukaisesti. Herkät pinnat Testaa yhteensopivuus huomaamattomassa paikassa. Tuotteen värin ja hajun muutokset ovat mahdollisia erityisesti säilytettäessä tuotetta auringonvalossa. Näillä väri- ja hajumuutoksilla ei kuitenkaan ole vaikutusta tuotteen desinfiointitehoon.

Varoitukset

FD 366 sensitive top wipes on luokiteltu ja merkitty CLP-määräyksen mukaisesti: katso tuotemerkinnät ja käyttöturvallisuustiedote.

Riippumattomat lausunnot – omat tutkimukset

Lausunnot ovat saatavilla pyynnöstä

CE 0124

Käyttö	Vaikutusaika
Pintadesinfiointi (VAH-menetelmät)¹⁾	1 min.
Bakteerit¹⁾ ja hiivasienet¹⁾	1 min.
Tb-bakteerit¹⁾	2 min.
Vaccinia-virukset ml. HBV, HCV, HIV^{2), 3)}	30 s.
Noro-virukset⁴⁾	5 min.

1) Testattu vähäisessä ja suuressa kuormituksessa (VAH, EN 13727, EN 13624, EN 14348, EN 16615).

2) Testattu ilman kuormitusta ja kuormitettuna DVV/RKI-suosituksen mukaisesti.

3) RKI-lausunnon mukaisesti (Bundesgesundheitsbl. 60, 353 - 363, 2017).

4) Testattu vähäisessä kuormituksessa (EN 14476).

Myynti

Dürr Dental SE
Höfigheimer Str. 17
74321 Bietigheim-Bissingen
Germany
www.duerrdental.com
info@duerrdental.com

Valmistaja

orochemie GmbH + Co. KG
Max-Planck-Straße 27
70806 Kornwestheim
Germany
www.orochemie.de
info@orochemie.de

