

FD 366 sensitive top wipes

Herkkien pintojen desinfiointi

FD 366 sensitive top wipes sopivat invasiivisten ja ei-invasiivisten lääkintälaitteiden, kuten hoitolaitteiden muoviosien ja tekonahkapäällisten, akryyililasin, laitesuojusten, letkutelineiden jne. pikadesinfiointiin. Lisäksi FD 366 sensitive top wipes sopivat myös hoitolaitteiden tai XR-röntgenfilmin kehityslaitteiden käyttöpaneelisiin. Desinfioitavat pinnat kuivuvat nopeasti.

Koostumus: 100 g vaikuttavan aineen liuosta sisältää 17 g 1-propanolia, 0,25 g alkyylibentsyylidime-tyyli- ammoniumkloridia, 50 %, apuaineita ja vettä.

Vaikutusalue: Bakteerit, tuberkuloosibakteerit, hiivasienet, rajoitetusti virukset (vaipalliset virukset ml. HBV, HCV ja HIV¹⁾ sekä vaipattomat Noro-virukset). FD 366 sensitive on **VAH-listattu**. Testattu standardien EN 13727, EN 13624, EN 14348, EN 14476, EN 16615 mukaan.

¹⁾ RKI-suosituksen mukaan (Bundesgesundheitsbl. 60, 353-363, 2017).

Käyttö: Ota FD 366 sensitive top wipes -pyyhkeet yksitellen säiliöstä, hankaa desinfioitavia pintoja ja esineitä ja anna valmisteen vaikuttaa. Vaikutusaika VAH:n mukaisesti 1 minuutti (katso taulukko). Sulje flowpack uudelleen heti pyyhkeen ottamisen jälkeen. Katso lisätietoja internetissä olevista tuoteselosteista.

Huomautus: Lääkinnällisten laitteiden kuten polymerointilamppujen, turbiinien sekä käsi- ja kulma-kappaleiden ulkopinnat on desinfioitava valmistajan antamien määräysten mukaisesti. Testaa aineen yhteensopivuus herkkien materiaalien kanssa huomaamattomassa paikassa. FD 366 sensitive top wipes värin ja hajun muutoksilla säilytyksen aikana ei ole tehoa heikentäviä vaikutuksia.

 katso leimaa.

Varoitus. Ärsyttää voimakkaasti silmiä. Käytä suojakäsineitä silmiensuojainta/kasvosuojainta. JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhdo huolellisesti vedellä usean minuutin ajan. Poista piilolinssit, jos sen voi tehdä helposti. Jatka huuhtomista. Varastoi paikassa, jossa on hyvä ilmanvaihto. Säilytä tiiviisti suljettuna. Hävitä sisältö/pakkaus on toimitettava ongelmajätteen vastaanottopaikkaan.
