

Tuotetiedot

FD 366 sensitive top wipes

Herkkien pintojen desinfiointi



FD 366 sensitive top wipes yhdellä silmäyksellä

- Kätevät desinfointipyyhkeet invasiivisten ja ei-invasiivisten lääkinnällisten laitteiden herkkien pintojen pikadesinfiointiin vastaanotoilla, laboratorioissa ja sairaaloissa.
- Hyvä yhteensopivuus materiaalien kanssa. Sopii erityisesti hoitolaitteiden herkille akryyli-, muovi- ja tekonahkapinnoille.
- Vaikutusaika VAH:n mukaan vain 1 minuutti.
- Laaja vaikutusalue: bakterisidisesti, tuberkulosidisesti, hiivasieniä tuhoavasti, rajoitetusti virusidisesti (vaipalliset virukset ml. HBV, HCV, HIV, koronavirukset sekä vaipattomat norovirukset).
- FD 366 sensitive top wipes -pyyhkeiden vaikuttavan aineen liuos FD 366 sensitive on testattu ajankohtaisten VAH-menettelmien ja eurooppalaisten standardien mukaan.
- Testattu 4-kenttätestissä VAH:n ja EN 16615:n mukaan.
- FD 366 sensitive top wipes -pyyhkeet ovat VAH-sertifioituja. FD 366 sensitive on VAH-listassa, desinfointiaineiden IHO-listassa.
- Pyyhkeiden koko: 175 x 250 mm.

Ominaisuudet

Dürr System-Hygiene -tuotesarjan FD 366 sensitive top wipes on aldehyditon, alkoholipitoinen käyttövalmis desinfointipyyhe invasiivisten ja ei-invasiivisten lääkinnällisten tuotteiden ja lääketieteellisten kalusteiden herkkien pintojen pikadesinfiointiin vastaanotoilla, laboratorioissa ja sairaaloissa. FD 366 sensitive top wipes -desinfointipyyhkeille on ominaista nopea vaikutus ja hyvä yhteensopivuus materiaalien kanssa. Desinfioidut pinnat kuivuvat nopeasti.

Koostumus

FD 366 sensitive top wipes -pyyhkeet sisältävät FD 366 sensitive -ainetta, joka on alkoholisten ja kvaternääristen ammoniumyhdisteiden sekä apuaineiden nopeavaikutteinen yhdistelmä. 100 g vaikuttavan aineen liuosta sisältää 17 g 1-propanolia, 0,125 g alkyylibentsyyli-dimetyyli-ammoniumkloridia, apuaineita ja vettä.

Mikrobiologinen teho

FD 366 sensitive top wipes vaikuttaa bakterisidisesti¹⁾, tuberkulosidisesti¹⁾, hiivasieniä tuhoavasti¹⁾, rajoitetusti virusidisesti (vaipalliset virukset ml. HBV, HCV ja HIV^{2),3)} sekä vaipattomat norovirukset⁴⁾). FD 366 sensitive on VAH-listassa, desinfointiaineiden IHO-listassa. Vaikuttavan aineen liuos on testattu DVV/RKI-suosituksen, EN 13727, EN 13624, EN 14348, EN 14476, EN 16615 mukaan. FD 366 sensitive top wipes -pyyhkeet on testattu käyttövalmiina pyyhkeinä 4-kenttätestissä VAH:n ja EN 16615:n mukaan.

Käyttö

Ota FD 366 sensitive top wipes -desinfointipyyhkeet yksitellen säiliöstä. Pyyhi desinfioitavat pinnat ja esineet ja anna valmisteeseen vaikuttaa. Desinfioi pinnat, joilla on näkyvää likaa, FD 366 sensitive top wipes -desinfointipyyhkeellä, ja poista lika. Desinfioi puhdistetut pinnat vielä kertaalleen. Varmista, että ainetta on käytetty koko alueella ja että vaikutusaikaa on noudatettu. Sulje Flowpack välittömästi sen jälkeen, kun sieltä on otettu liina. Vaikutusaika on VAH:in mukaisesti 1 minuutti, TB-bakteereille 2 minuuttia ja viruksille 30 sekuntia – 5 minuuttia.

Ympäristövaikutukset

Pakkauksen materiaalin voi lämpökierrättää. Hävitä käytetyt pyyhkeet talousjätteen seassa. Älä heitä WC:hen.

Tuotetiedot

FD 366 sensitive top wipes

Herkkien pintojen desinfiointi

Katso lisätietoja käyttöturvallisuustiedotteista.

Fysikaaliset ominaisuudet

Vaikuttavan aineen liuos:

Ulkonäkö: kirkas, väritön liuos

Tiheys: $D = 0,97 \pm 0,02 \text{ g/cm}^3$ (20 °C)

Leimahduspiste: 33 °C (DIN 51755)

Säilyvyys

3 vuotta

Avattu pakkaus 1 kuukausi.

Pakkauskoot

Flowpack, sis. 50 pyyhettä

4 x 50 pyyhettä pakkauksessa

Säilytys

Säilytä valmistetta vähintään 5 °C:n ja enintään huoneen lämpötilassa.

Yleisiä ohjeita

Desinfioi lääkkien tuotteiden kuten polymerointilamppujen, turbiinien sekä käsi- ja kulmakappaleiden ulkopinnat ennen uudelleenkäsittelyä valmistajan antamien ohjeiden mukaisesti. Testaa aineen yhteensopivuus herkkien materiaalien kanssa huomaamattomassa paikassa. Tuotteen värin ja hajun muutokset ovat mahdollisia erityisesti säilytettäessä tuotetta auringonvalossa. Näillä väri- ja hajumuutoksilla ei kuitenkaan ole vaikutusta tuotteen desinfiointitehoon. Vain ammattikäyttöön. Kaikista tämän tuotteen yhteydessä ilmenevistä vakavista tapahtumista on viipymättä ilmoitettava valmistajalle ja jäsenmaan toimivaltaiselle viranomaiselle.

Varoitukset

FD 366 sensitive top wipes on luokiteltu ja merkitty CLP-määräyksen mukaisesti: katso tuotemerkinnät ja käyttöturvallisuustiedote.

Käyttö	Vaikutusaika
Pintadesinfiointi (VAH-menetelmät)¹⁾	1 min.
Bakteerit¹⁾ ja hiivasienet¹⁾	1 min.
Tb-bakteerit¹⁾	2 min.
Vaipalliset virukset ml. HBV, HCV, HIV, koronavirukset^{2), 3)}	30 s.
Norovirukset⁴⁾	5 min.

1) Vaikuttavan aineen liuos on testattu vähäisessä ja suuressa kuormituksessa (VAH, EN 13727, EN 13624, EN 14348, EN 16615).

2) Testattu ilman kuormitusta ja kuormitettuna DVV/RKI-suosituksen mukaisesti.

3) RKI-lausunnon mukaisesti (Bundesgesundheitsbl. 60, 353 - 363, 2017).

4) Testattu vähäisessä kuormituksessa (EN 14476).

Riippumattomat lausunnot – omat tutkimukset

Lausunnot ovat saatavilla pyynnöstä

CE 0124

Myynti

Dürr Dental SE
Höfigheimer Str. 17
74321 Bietigheim-Bissingen
Germany
www.duerrdental.com
info@duerrdental.com

Valmistaja

orochemie GmbH + Co. KG
Max-Planck-Straße 27
70806 Kornwestheim
Germany
www.orochemie.de
info@orochemie.de

