





TUOTE	KÄYTTÖKOHDE	TARKENNUS KÄYTTÖ-KOHTEESEEN	KÄYTTÖ-PITOISUUS (%)	VAIKUTUS-AIKA	MILLOIN KÄYTETÄÄN	HUOMIOT	PAKKAUKSET	
	Orbis pesuneste	Käsien pesuun	100 %		Pese aina näkyvästi likaiset kädet	Kastele kädet, hiero saippua huolellisesti, huuhtele	MD121942 Pumpppullo 0,5 L MD121940 Dispensopac 1 L	
	Orbis käsihuhde	Käsien desinfiointiin	100 %	3-5 ml 30 s 3-5 ml 60 s	Ennen potilaskosketusta tai toimenpidettä sekä sen jälkeen. Hoitotapahtuman aikana aseptisen työjärjestyksen mukaisesti. Ennen hoito-ympäristöön menemistä ja sieltä poistuttaessa	30 s hygieeninen käsien desinfektio 60 s kirurginen käsien desinfektio	MD121941 Pumpppullo 0,5 L MD121939 Dispensopac 1 L	
	Orbis nopeasti tehoava desinfektioaine	Pinnoille ja hoito-yksiköille	Alkoholia kestäville pinnoille	100 %	Kuivumis-aika	Jokaisen potilaan jälkeen	Nihkeä pyyhintä, purista ylimääräinen neste liinasta	MD121936 Keinukorkkipullo 0,5 L MD121937 Kanisteri 5 L
	Orbis nopeasti tehoava desinfektioaine Wipes						Orbis nopeasti tehoava desinfektioaine valmiiksi imeytettynä liinoihin (20 x 20 cm).	MD125294 Säiliö + liinat 150 kpl MD125295 Refill liinat 100 kpl
	Orbis ORBI-Sept pintojen desinfiointiiviste	Hoituhuoneen yleis-siivoukseen	Ei-invasiivisille lääkinnällisille laitteille, verhoilulle tai lattioille	0,5-3 %	15-60 min	Päivän päätteeksi	Kontaminoimaton liuos pysyy käyttökelpoisena n. 30 päivää. Puhdistusainejäämien estämiseksi pyyhi pinnat kerran viikossa pelkällä vedellä.	MD169158 Pullo 2,5 L
	Orbis Dry Wipes	Pintojen pyyhintään					Kuivat pyyhintäliinat (20 x 20 cm). Lisää desinfektioaine pakkauksen ohjeen mukaan.	MD164517 Säiliö + liinat 150 kpl MD164518 Refill liinat 100 kpl
	Orbis ORBI-Sept tehoimun pesu- ja desinfiointiiviste	Imulaitteistolle		1-3 %		1-2 krt/päivä	Annostele 10-30 ml tiivistettä 1 litraan vettä ja annostele imulaitteistoon.	MD164014 Pullo 2,5 L
	Orbis tehoimun suodatin					Puhdistetaan päivittäin, vaihdetaan viikoittain		MD166455 12 kpl
	Orbis sylkykupin puhdistus- ja desinfiointiaine	Sylkykupille, soveltuu myös WC-tiloihin		100 %	Vähintään 1 min	1-2 krt/päivä	Annostele, anna vaikuttaa ja huuhtelee.	MD115211 Kaatonokkapullo 750 ml
	Orbis ORBI-Sept jäljennösten desinfiointiaine	Alginaatti-, silikoni- ja polyeetteri-jäljennöksille	Upotusdesinfektio	100 %	1 min *	Jäljennöksen oton jälkeen	Desinfioi aina jäljennökset ennen labraan lähettämistä. Upota alginaatit ja hydrokolloidit vain hetkeksi ja anna kuivua. Huuhtelee jäljennös sen jälkeen vedellä. Noudata tarkoin vaikutusaikaa.	MD168125 Pullo 2,5 L
	Orbis Tray Cleaner jäljennöslusikoiden puhdistustii-viste	Jäljennösaineiden puhdistamiseen instrumenteista	Irrottaa alginaatti-, sinkkioksidieugenioli-, karboksylaatti- ja fosfaattisementtijäämät sekä termoplastiset vahat mm. jäljennöslusikoista	5-10 % tarvittaessa 100 %	45 min	Tarvittaessa	Upota puhdistettavat instrumentit liukseen. Liuosta voidaan käyttää myös ultraäänipesulaitteessa. Sopii ruostumattomille materiaaleille. Huom! Kromia, nikkeliä ja alumiinia sisältäviä tuotteita ei tule laittaa samaan liukseen korroosio-vaaran vuoksi.	MD117137 Orbis Tray Cleaner 1 L
	Orbis ORBI-Sept instrumenttien desinfiointiiviste	Instrumenteille, juurihoitoneuloille	Upotusdesinfektio	1,5-1 %	15-60 min**	Heti käytön jälkeen	Puhdista näkyvästi likaiset instrumentit ennen upotusdesinfektioita. Vaikutusajan jälkeen huuhtelee ja kuivaa hyvin. Käyttöliuos vaihdetaan päivittäin tai kun liuos on silminnähden likaista. Ultraäänipesulaitteen dekanterilasien desinfiointineste vaihdetaan joka käyttösyklin jälkeen.	MD168461 Pullo 2,5 L
	Orbis esikäsitteilyaine	Suoja-aine instrumenteille		100%	Max. 4 vrk	Tarkoitettu käytettäväksi instrumenteille, jotka eivät päädy pesuun tai dekontaminoivaan liukseen heti käytön jälkeen.	Aseta instrumentit kuljetuslaatikkoon. Suihkuta esikäsitteilyainetta instrumenttien päälle. Huolehdi instrumenttien riittävästä kastumisesta. Huuhtelee ennen jatkokäsittelyä.	MD163274 Suihkupullo 0,5 L MD163276 Suihkupullo 1 L
	Orbis käyttövalmis liuos instrumenteille	Instrumenteille		100%	20 min-3 h	Käyttövalmis kylmädesinfektio-neste. Soveltuu erityisesti kuumudelle herkille materiaaleille ja instrumenteille. Käyttöalueena ei-invasiiviset instrumentit ja -välineet esim. valokuvauspeilit, oikomispihdit, porat.	Upota instrumentit huolellisesti liukseen ja huuhtelee vaikutusajan päätyttyä. Liuoksen max. käyttöaika 30 vrk.	MD163278 Pullo 1 L MD163277 Kanisteri 5 L
	Orbis ORBI-Sept porien desinfiointiiviste	Pyöriville instrumenteille	Kaikille porille, mm. timanteille, freesareille, finiireille, kiillotuskärjille	100 %	5 min***	Heti käytön jälkeen	Sisältää korrosionestoainetta. Pyörivien instrumenttien desinfiointioon suositellaan käytettävän ultraäänilaitetta.	MD168176 Pullo 2,5 L
Muut merkinnät (jätteet yms.)								

* TbB 15 min ** TbB 2 % 60 min *** TbB 30 min

Tutustu kaikkien tuotteiden käyttöohjeisiin huolella. Hygieniaohjeistus on suuntaa antava. Vastaanotto on vastuussa hyväksyttävän ja riittävän hygieniakäytännön toteutuksesta.

Päiväys _____

Hygieniaavastaava _____